

尺寸：85*85mm

MEDIDOR DE TEMPERATURA COM DISPLAY DIGITAL
058-0665



- Fixação na parede
- Segurança e precisão
- Medição de temperatura até 20cm de distância



Conheça o seu equipamento



- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1) Display de temperatura | 7) Botão - |
| 2) Indicador normal (verde) | 8) Sensor infravermelho |
| 3) Indicador irregular (vermelho) | 9) Saída sonora |
| 4) Botão SET (Configuração) | 10) Furo de fixação |
| 5) Botão MODO (°C / °F) | 11) Conector 1/4" |
| 6) Botão + | 12) Entrada USB C |

Especificações técnicas

Temperatura de operação: 10° a 40°
Tempo de resposta: 0.5s
Precisão: +0,3°
Escala: 10° a 42,9°
Tensão de entrada: DC 5V
Dimensões: 120 x 150 x 28mm
Aplicação: Escolas, escritórios, lojas, ônibus, shoppings, fábricas, etc.

Instruções de uso

- 1) Ao ligar, o display exibe 0.0 °C, posicione-se em frente ao sensor por 1 segundo e o equipamento vai exibir automaticamente a temperatura e acender o indicador se a temperatura está normal. Temperaturas normais exibem o indicador verde e o alerta sonoro, temperaturas fora do padrão normal, exibem o indicador vermelho e soam um alarme.
- 2) Para calibrar a temperatura no equipamento, pressione e segure o botão S até o display indicar FH. É necessário o uso de um calibrador profissional para efetuar esse procedimento. Não tente calibrar sem o equipamento adequado.
- 3) Para alternar a escala entre °C e °F, pressione o botão M.
- 4) Utilize os botões + e - para visualizar o histórico das medições efetuadas.
- 5) Para definir a temperatura de alarme, pressione e segure o botão - até ouvir um bip e o display mostrar 37,0°C, utilize os botões + e - para selecionar a temperatura de alarme.

Precauções

- 1) Para garantir a precisão da leitura, ligue o equipamento cerca de 20 minutos antes de iniciar a operação.
- 2) Não utilize em ambientes de alta temperatura ou alto risco. Mantenha o equipamento protegido, não desmonte, evite impactos.

Importado por: 57.464.653/0004-91 - Origem: China
Garantia: 1 ano - SAC: suporte@chipsce.com.br

